

STAMMOPUR P

Prothetik-Reiniger - zur täglichen Pflege für das Ultraschallbad

STAMMOPUR P ist ein Prothetik-Reiniger zur täglichen Pflege von Prothetik und Zahnspangen im Ultraschallbad nach professioneller Grundreinigung beim Zahnarzt oder Kieferorthopäden. STAMMOPUR P entfernt Beläge und Speisereste porentief, schonend und gründlich. Es empfiehlt sich, vor der erstmaligen Anwendung eine professionelle Grundreinigung bei Ihrem Zahnarzt oder Dentallabor vorzunehmen.

MATERIALVERTRÄGLICHKEIT: STAMMOPUR P ist für Edelmetalle, Edelstahl, Kunststoffe, Keramiken, Glas und Gummi geeignet.

ANWENDUNG IM ULTRASCHALLBAD: Dosierung: 5 % STAMMOPUR P 95% Wasser
Reinigungszeit: 5 Minuten

Achtung: STAMMOPUR P nur im Einsatzgefäß verwenden.

Kontaktflüssigkeit, z.B. TICKOPUR R 22, abmessen und in die Schwingwanne geben. Mit Leitungswasser bis zur Füllhöhenmarkierung der Schwingwanne auffüllen. STAMMOPUR P mit dem Messbecher abmessen und in das Einsatzgefäß (Becherglas etc.) geben und mit Leitungswasser auffüllen. Messbecher mit Wasser ausspülen. Die Prothetik in das Einsatzgefäß legen. Auf vollständige Benetzung der zu reinigenden Zahnprothese/Zahnersatz ist zu achten. Sind die Beläge nach 5 Minuten noch nicht entfernt, nochmals 5 Minuten beschallen. Nach der Reinigung Teile sofort unter fließendem Wasser gründlich und sorgfältig abspülen. Das Konzentrat ist bei angebrochener und geschlossener Flasche 5 Jahre haltbar. Die 5%ige Gebrauchslösung sollte aus hygienischen Gründen regelmäßig, **spätestens** nach 5 Tagen erneuert werden.

SICHERHEITSHINWEISE: Einstufung und Kennzeichnung gem. EG-Richtlinie 88/379/EG: Xi, reizend. R 36/38: Reizt die Augen und die Haut. S 2: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. S 26: Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S 37: Geeignete Schutzhandschuhe tragen. S 46: Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.



Die Kennzeichnung bezieht sich auf das Konzentrat. Die 5%ige Gebrauchslösung ist nicht kennzeichnungspflichtig. Bei der Anwendung im Ultraschallbad sind die bei der Anwendung im Ultraschallbad sind die Hinweise des Geräteherstellers zu beachten.

BESONDERE HINWEISE: Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht einnehmen.

ENTSORGUNG: Die Gebrauchslösung mit Wasser verdünnt in den Abfluss geben. Entleerte Flasche mit Wasser ausspülen und über das Duale System (Grüner Punkt) entsorgen. Verschüttetes STAMMOPUR P aufnehmen, die benetzte Oberfläche mit klarem Wasser nachwischen und trocknen.

CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN:	Aussehen:	klare, hellgelbe Flüssigkeit
	Temperaturstabilität:	-18 bis 80 °C
	pH-Wert:	2,0 bei 1 %
	Zusammensetzung:	<10 % nichtionische Tenside, <5 % kationische Tenside, Phosphorsäure.
	Lieferform:	1 Liter-HDPE-Flasche
	Bestellnummer:	536002

Die Angaben sollen unverbindlich beraten und verstehen sich unter Vorbehalt eventueller Änderungen der Zusammensetzung sowie rechtlicher und sonstiger Sicherheitsvorschriften. Basis dieses Datenblattes ist die STAMM-Produktinformation 81158-3/2006-09.

BERATUNGS- UND BESTELLSHOTLINE 040 636 520 -23

