

# DENTALY Noplak N

## Prothetik-Reiniger - zur täglichen Pflege im Ultraschallbad

DENTALY Noplak N ist ein Hochkonzentrat zur Reinigung von Zahnprothesen im Ultraschallbad. DENTALY Noplak N entfernt Beläge, Speisereste und Verfärbungen (auch Tee, Nikotin und Kaffee-Ablagerungen) sicher und zuverlässig von Zahnprothesen, herausnehmbarem Zahnersatz etc. DENTALY Noplak N ist chlorfrei und bleicht den Prothesenkunststoff nicht aus.

**MATERIALVERTRÄGLICHKEIT:** DENTALY Noplak N ist für Edelmetall, Edelstahl, Kunststoff, Keramik, Glas und Gummi geeignet. **Achtung: Halten Sie DENTALY Noplak N von Marmor- und Naturstein fern.**

**ANWENDUNG IM ULTRASCHALLBAD:** Dosierung im Ultraschallbad: 10 % DENTALY Noplak N, 90% Leitungswasser  
Reinigungszeit: 5 Minuten

1 Teil DENTALY Noplak N mit 10 bis 20 Teilen Wasser verdünnen und im Ultraschall-Reinigungsgerät bzw. Nadelbad verwenden. Bei Einsatz des DENTALY Noplak N ohne Ultraschall bitte 1 Teil DENTALY Noplak N mit 10 Teilen Wasser verdünnen und die zu reinigenden Teile einlegen. Die anwendungsfertige Lösung kann bis zu einer Woche verwendet werden. Bitte verwenden Sie DENTALY Noplak N niemals ohne die Verdünnung, da das Hochkonzentrat nur in Verbindung mit Wasser seine Aktivität entfalten kann.

Bei Verwendung im DENTALY *Sonic* Dentasonic® Ultraschall-Reinigungsgerät schütten Sie bitte 1-2 Verschlusskappen, das entspricht ca. 10ml, in den herausnehmbaren Flüssigkeitstank und füllen diesen mit warmen Wasser bis zur max. Füllhöhe (siehe Füllhöhenbegrenzung „MAX“ im Tank) auf. Je nach Verschmutzungsgrad kann die Reinigungszeit zwischen 5 Minuten und 30 Minuten variieren.

**SICHERHEITSHINWEISE:** Einstufung und Kennzeichnung. Es gelten keine besonderen Vorschriften zum Transport und zur Lagerung. DENTALY Noplak N reizt die Augen und die Haut (R36/38), aus diesem Grund bitte Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.



**BESONDERE HINWEISE:** Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht einnehmen.

**ENTSORGUNG:** Die Gebrauchslösung mit Wasser verdünnt in den Abfluss geben. Verschüttetes DENTALY Noplak N aufnehmen, die benetzte Oberfläche mit klarem Wasser nachwischen und trocknen.

<b>CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN:</b>	<b>Zustand:</b>	Flüssig
	<b>Farbe:</b>	Orange
	<b>Dichte (20 °C):</b>	1,205 g/ml
	<b>pH-Wert:</b>	2,1
	<b>Zusammensetzung:</b>	< 5% : - Nicht ionische Tenside, Phosphorsäure
	<b>Lieferform:</b>	100ml Flasche
	<b>Bestellnummer;</b>	536001                    1 x Flasche á 100ml
		536001-3                3 x Flasche á 100ml
		536005                    1 x Flasche á 1 Liter

Die Angaben sollen unverbindlich beraten und verstehen sich unter Vorbehalt eventueller Änderungen der Zusammensetzung sowie rechtlicher und sonstiger Sicherheitsvorschriften.

**BERATUNGS- UND BESTELLSHOTLINE 040 25 77 67 570**  
info@prothesenpflege.de  
shop.prothesenpflege.de



Revisionsstand 2010//2