

Schritt 1

Waschbecken mit etwas Wasser füllen, damit nichts passiert, wenn die Prothese runterfällt.



Schritt 2

Teleskope, Stege,
Klammern usw. mit den
blau-grünen Borsten-
zapfen reinigen.



Original Trioblanc-Prothesenbürste



Schritt 3

Ober- und Unterseite der Prothese mit dem blau-grünen Borstenkamm und dem weißen Borstenfeld reinigen.



Schritt 4

Zahnoberflächen mit
dem weißen Borstenfeld
reinigen.



Original Trioblanc-Prothesenbürste



Schritt 5

Zahnzwischenräume
und Problemzonen mit
dem weißen Borstenfeld
oder den grünen
Borstenzapfen reinigen.



Original Trioblanc-Prothesenbürste

